

CLEARsplint®

*MMA-freie
Interimsversorgung*



für ein perfektes Lächeln

astron®

Patienteninformation

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer
astron CLEARsplint® Premium-Versorgung!

Vorteile:

- ↪ absolut präzise Anpassung
- ↪ selbstadjustierend
- ↪ hohe Verträglichkeit, da frei von Methylmethacrylat (MMA)
- ↪ hoher und spannungsfreier Tragekomfort, kein Druckgefühl im Mund
- ↪ vergilbt nicht, da frei von Aminen
- ↪ unterfütterbar und reparabel

Pflegehinweise:

- ↪ Bitte reinigen Sie Ihr CLEARsplint®-Produkt nach jedem Tragen mit DuraClean® Spezialreiniger
- ↪ Prothesenreiniger und alkoholhaltige Desinfektionsmittel dürfen NICHT verwendet werden!
- ↪ Legen Sie Ihre CLEARsplint®-Versorgung vor dem Einsetzen in den Mund unbedingt immer in warmes Wasser (40-50 °C).
- ↪ CLEARsplint® Aufbisschiene oder Interimsprothese vor extremer Hitze bzw. Kälte schützen.

Spezialreiniger für CLEARsplint® Aufbisschienen und Interimsprothesen DuraClean®



Sparsam im Gebrauch – reicht für 48 Anwendungen
Reiniger (170 g) mit Behälter und Bürste REF 26170S
Reinigungsmittel - Dose mit 170 g REF 26171
Reinigungsbürste REF 26172
Reinigungsbehälter REF 26173



KENTZLER-KASCHNER DENTAL GmbH
Mühlgraben 36
73479 Ellwangen/Jagst
Telefon: +49 (7961) 90 73-0
Fax: +49 (7961) - 5 20 31
info@kkd-topdent.de
www.kkd-topdent.de



Astron Dental Corp.
Lake Zurich, Ill. 60047
Made in USA


CLEARsplint®

*MMA-freie Premium-
Aufbisschiene*



Der perfekte Schutz!

astron®

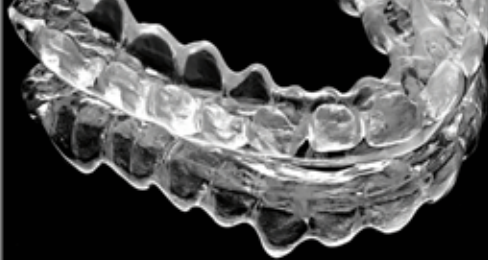

astron[®] CLEARsplint[®]

Darstellung Memory-Effekt:



Die verformte Schiene stellt sich bei Körpertemperatur in den Urzustand zurück und bleibt permanent anpassungsfähig. Die gute Oberflächenhärte geht auch unter Wärme nicht verloren.



Situationsmodell



...mit passgenauem Aufbisschutz



Vorteile von astron CLEARsplint[®], die für sich sprechen!

- ⊖ die thermoaktive Flexibilität der Schiene ermöglicht eine präzise Anpassung (Memory-Effekt)
- ⊖ ist selbstadjustierend im Mund, wenn sie vor Gebrauch zur Flexibilisierung in warmes Wasser (40-50 °C) gelegt wird
- ⊖ hohe Verträglichkeit – Methylmethacrylat (MMA)-frei
- ⊖ bessere Anpassung ermöglicht höheren und spannungsfreien Tragekomfort - lange tragefähig
- ⊖ durchsichtige und optische Klarheit erlaubt nahezu unbemerktes Tragen
- ⊖ Reparaturen und Ausbesserungen können durchgeführt werden
- ⊖ einfache Hygiene, zur täglichen Reinigung leicht herausnehmbar
- ⊖ hohe Bruchstabilität - optimaler Schutz der Zähne

wichtige Patienteninformation auf der Rückseite --->

Vorteile von astron CLEARsplint[®], die für sich sprechen!

- ⊖ Ästhetischer Zahnersatz ohne Metallklammern
- ⊖ Sichtbarkeit des natürlichen Zahnfleisches
- ⊖ durchsichtige und optische Klarheit erlaubt nahezu unbemerktes Tragen
- ⊖ die thermoaktive Flexibilität der Interims-Prothese ermöglicht eine präzise Anpassung - hervorragende Klemmwirkung und leichtes Ausgliedern
- ⊖ ist selbstadjustierend im Mund, wenn sie vor Gebrauch zur Flexibilisierung in warmes Wasser (40-50 °C) gelegt wird
- ⊖ hohe Verträglichkeit – Methylmethacrylat (MMA)-frei
- ⊖ Reparaturen und Erweiterungen können durchgeführt werden
- ⊖ einfache Hygiene, zur täglichen Reinigung leicht herausnehmbar
- ⊖ hohe Bruchstabilität

wichtige Patienteninformation auf der Rückseite ---->

Qualität und Ästhetik aus Meisterhand - überreicht von:

Zahntechnisches Labor Schregle

Zeppelinstraße 10

86825 Bad Wörishofen

Telefon: 0 82 47 9 62 69-0

labor@dental-schregle.de